

CBC Sling & Twist

Das hygienische Einhand-System zum Venenstauen




Vorteile auf einen Blick:

- Kontrolliertes Stauen, Lösen und Nachstauen mit Drehknopf (Twist)
- Einfache Anwendung durch Einhandbedienung
- Gewährleistet individuelle Staukraft je nach Patient
- Einmalgebrauch des Bandes:
keine Kreuzkontamination mit MRSA und anderen Keimen
- Breites Band (35 mm) verhindert das Einschnüren und Quetschen der Haut
- Einfache Bedienung auch mit Handschuhen dank weichem Vlies
- Mikroklett für einfaches Schließen und Öffnen haftet auf der gesamten Bandlänge
- Praktische Bandentnahme von der Rolle
- **Made in Germany**

Einsatzgebiet:

- Kliniken und Arztpraxen
- Isolierstationen
- Reha- und Blutspendezentren
- Alten- und Pflegeheime
- Notfalleinsatz, Luftrettung, Bundeswehr
- Onkologie uvm.

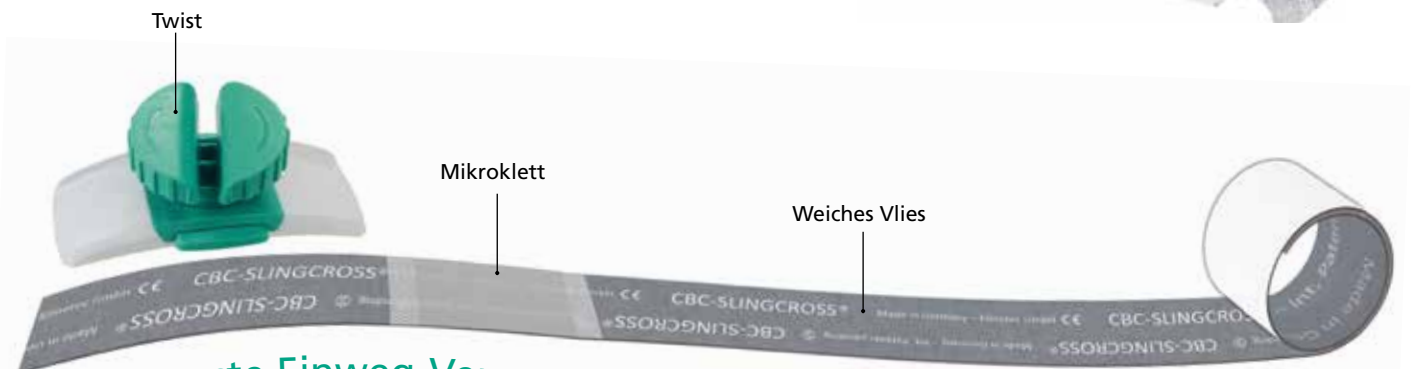


Der erste Einweg-Venenstauer zum Nachstauen
mit einer Hand

CBC Sling & Twist


Das hygienische Einhand-System zum Venenstauen

Anwendung:


Schulungsvideo:

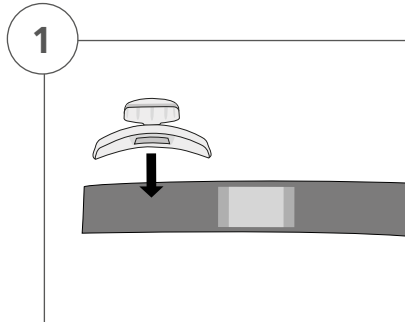


1 Twist auf das Bandende setzen

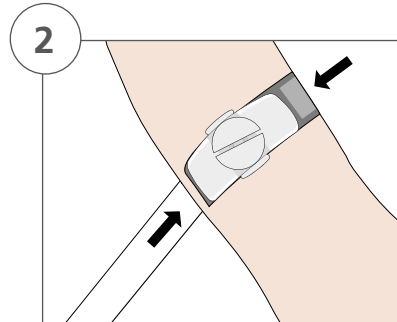


2 Unbedruckte Seite am Arm des Patienten anlegen

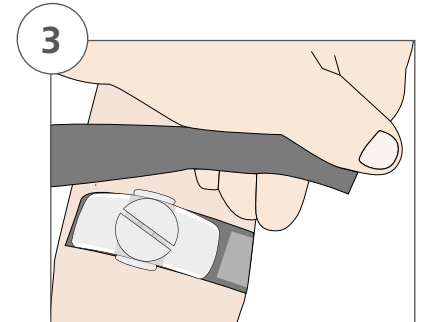


3 Band durch Twist ziehen

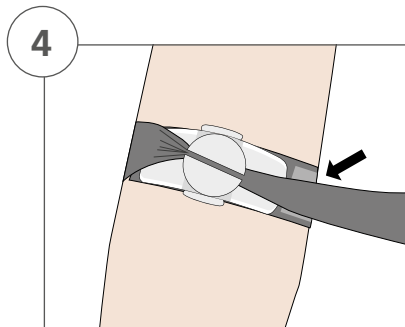

4 Im Klettbereich fixieren

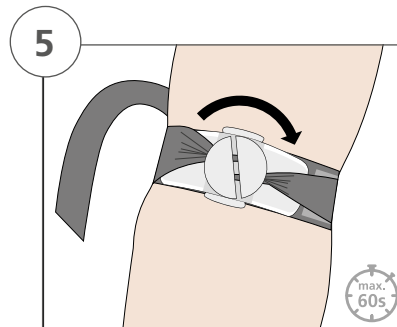

5 Durch Drehen Spannung aufbauen (Puls tastbar)

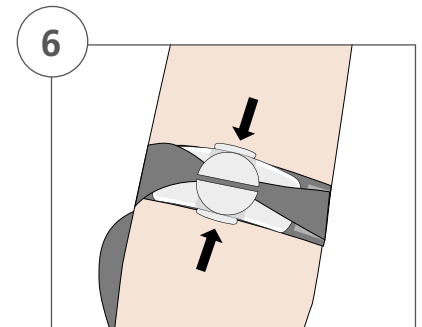

6 Zum Lösen einfach seitliche Knöpfe drücken

Nach Gebrauch Einweg-Venenstauer vorschriftsmäßig entsorgen, um Kreuzkontamination zu verhindern.

Twist vor der Wiederverwendung mit Desinfektionsmitteln reinigen.



SILIKON-FREI

DEHP-FREI

LATEX-FREI

Bestelldaten:

Artikelnummer	Produktbeschreibung CBC Sling & Twist	Verpackungseinheit
REF 521003 005	CBC Slingcross®: 3,5 cm breit, 65 cm lang (ca. 2g)	1 Rolle à 50 Stück in Spenderbox
REF 521021	CBC Twist: 3,5 cm breit, 7 cm lang, 2,5 cm hoch (16g)	1 Stück
REF 521030	CBC Sling & Twist Starterkit	1 CBC Twist inkl. 2 CBC Slingcross®
REF 521003 011	CBC Slingcross® Vorteilspack	10 Spenderboxen à 50 Stück