


CBC Slingcross®

Einweg-Venenstauer für Kinder Das Basisprodukt für die Venenpunktion


Vorteile auf einen Blick:

- Verbessert die Patientenhygiene
- Keine Kreuzkontamination mit MRSA und anderen Keimen durch Einmalgebrauch des Bandes
- Gewährleistet individuelle Staukraft je nach Patient
- Weiches Vlies ist sanft zur Haut
- Einfache Bedienung auch mit Handschuhen
- Mikroklett für einfaches Schließen und Öffnen, haftet auf der gesamten Bandlänge
- Auch als Tupferkomresse nach der Stauung verwendbar
- Praktische Bandentnahme von der Rolle
- **Made in Germany**
- Latexfrei, silikonfrei, DEHP-frei

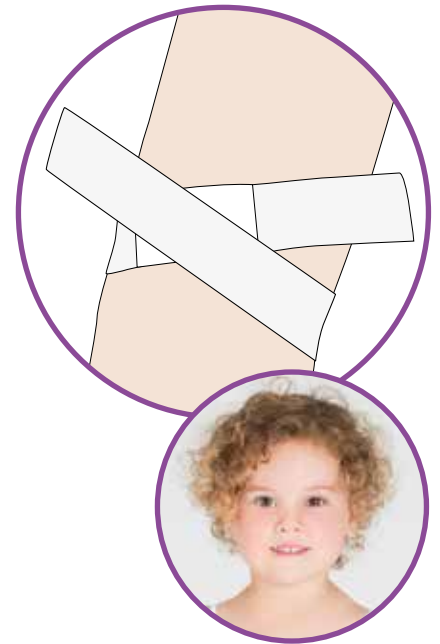

Einsatzgebiete:


- Pädiatrie
- Isostationen
- Rehazentren
- Hausbesuche
- Onkologie uvm.

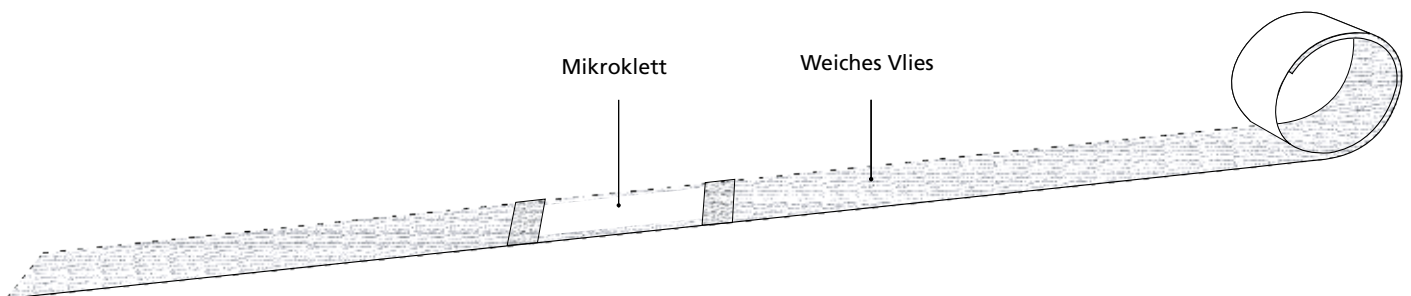


CBC Slingcross®

Einweg-Venenstauer für Kinder Das Basisprodukt für die Venenpunktion


Anwendung:

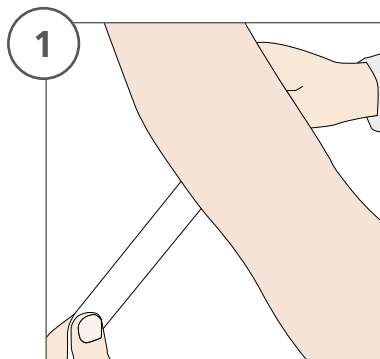

1 Mit dem **Klett nach außen** um den Arm des Patienten legen.

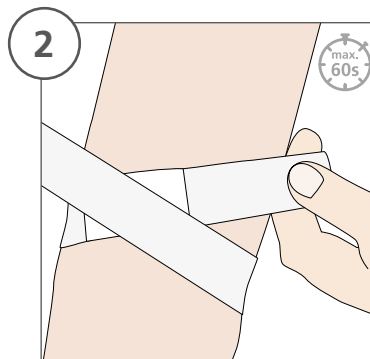

2 Straff ziehen und Spannung aufbauen – Puls muss tastbar sein. Im Klettbereich fixieren.

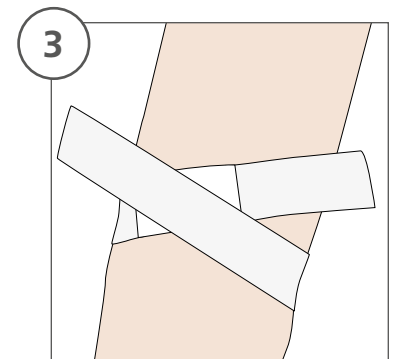

3 Zum Lösen einfach ziehen.

Nach Gebrauch nicht wiederverwenden, um Kreuzkontamination zu verhindern und vorschriftsmäßig entsorgen.



Bestelldaten:



Medizinprodukt

Produktbeschreibung:	CBC Slingcross® Kinder
Band	1,5 cm breit, 30 cm lang
REF 521003 007	50 Stück auf der Rolle in Spenderbox

Sparen Sie Kosten mit CBC Slingcross®:

- Keine Wiederaufbereitung, Reinigung oder Desinfektion.
- Zusatznutzen als Pflaster und Binde.
- Allergie gegen Latex, Silikon und DEHP ausgeschlossen.

P2040012D-2020-04