

## Der bunte Einweg-Venenstauer für Kinder

### Optimale Staukraft (ca. 20 mmHg)

- Durch Auseinanderziehen des Elastik-Bandes erreicht man zuverlässig die optimale Staukraft
- Definierte Staukraft – unterstützt den Anwender
- Fehlpunktionen (z.B. Ruptur) können verringert werden

### Keine aufwändige Reinigung & Desinfektion

- Einwegprodukt – keine Reinigung oder Desinfektion erforderlich
- Keine Kreuzkontamination mit MRSA und anderen Keimen

### Komfort für das medizinische Fachpersonal

- Einfache Bedienung auch mit Handschuhen
- Mikroklett für einfaches Schließen und Öffnen
- Besonders geringes Gewicht (ca. 2,5 g/Stück)

### Komfort für den Patienten


- Weiches Vlies – kein Quetschen, Einschnüren oder Klemmen der Haut
- Frei von Latex, Silikon und Weichmachern

### Individuell und farbenfroh

- Ab 20.000 Stück – Kundenspezifische Farben und Designs


### Einsatzgebiete

- Isolationspatienten
- Hausbesuche
- Pädiatrie
- Onkologie

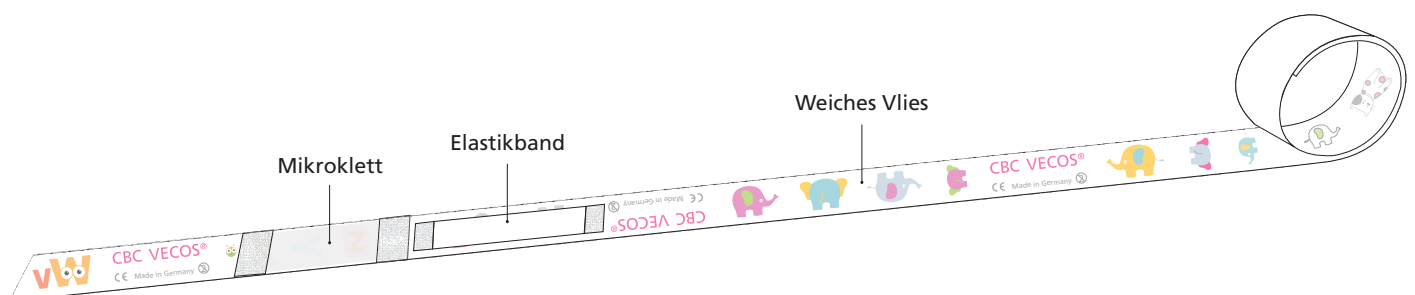


## Der bunte Einweg-Venenstauer für Kinder

### Anwendung

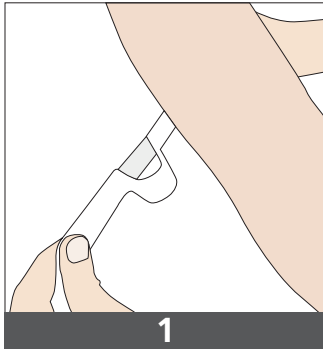

Unbedruckte Seite zum Arm des Patienten

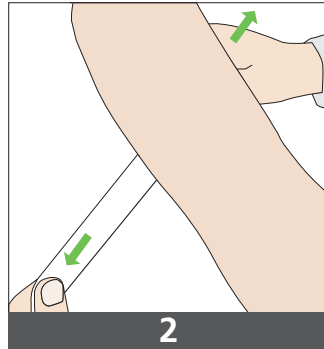

Zum Aufbau der Staukraft vollständig auseinanderziehen.



Straff um den Arm legen und im Klettbereich fixieren.



Zum Lösen einfach ziehen.

Nach Gebrauch nicht wiederverwenden, um Kreuzkontamination zu verhindern und vorschriftsmäßig entsorgen.

Video-Link



### Bestelldaten



Medizinprodukt

Produktbeschreibung:	CBC VECOS® KIDS
Band	3 cm breit, 50 cm lang
REF 521003 013	125 Stück in Spenderbox

### Sparen Sie Kosten mit dem CBC VECOS® KIDS:

- Keine Wiederaufbereitung, Reinigung oder Desinfektion.
- Frei von Latex, Silikon und DEHP (Weichmacher).