

CBC VECOS®

Einweg-Venenstauer Single-use tourniquet



- Keine MRSA-Übertragung – für hochinfektiöse Patienten
- Gewährleistet optimale Staukraft: ca. 20 mmHg
- Ideal bei trockener oder sehr feuchter Umgebung
- Luftverladbar – Besonders leichtes Gewicht: 3 g/St
- Einmalgebrauch: keine Kreuzkontamination
- Einfache Bedienung auch mit Handschuhen (Vlies-Material)
- Der Mikrokleb lässt sich leicht öffnen und schließen
- Kostengünstig: auch als Kompresse nach Venenpunktion einsetzbar

- No MRSA transmission – for high infections patients
- Ensuring optimal occlusion: ca. 20 mmHg
- Perfect for humid or very dry environments
- Particularly low weight: 3 g/pc
- Single use: no cross-contamination
- Easy to use with gloves on (fleece material)
- The micro-velcro®* allows for easy opening and closing
- Cost-effective: also usable as compress after venipuncture

*Velcro® is a registered trademark of Velcro Industries B.V.




Hygienisch. Sanft. Einfach. Sicher.
Hygienic. Gentle. Easy. Safe.


CBC VECOS®

Anwendung Application


Unbedruckte Seite zum Arm des Patienten halten. Place **unprinted side** on the patient's arm.

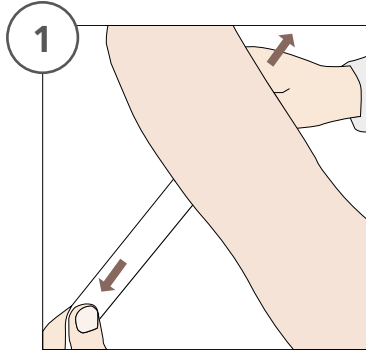

Band vollständig auseinanderziehen zum Aufbau der Staukraft.
Build up compression force by extending the tourniquet completely.

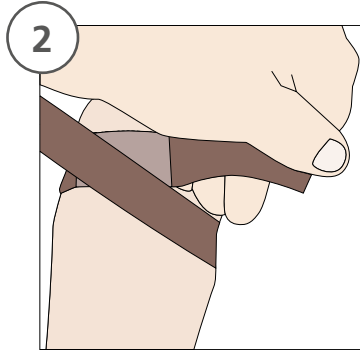

Straff um den Arm legen und im Klettbereich fixieren.
Place strap tightly around the arm and fix at the velcroed®* area.

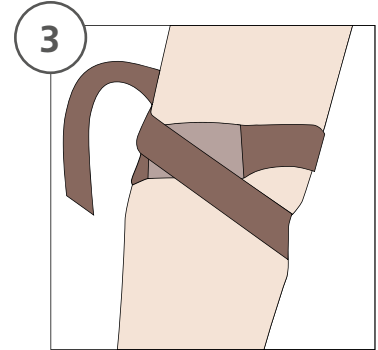

Zum Lösen einfach ziehen.
Simply pull to release the strap.

Nach Gebrauch nicht wiederverwenden, um Kreuzkontamination zu verhindern, und vorschriftsmäßig entsorgen.

Do not use again after use to avoid cross-contamination and dispose of in accordance with regulations.



Sehen Sie sich das Video zur Anwendung an:
Watch the video for application:

SILICONE-FREE



Medizinprodukt
Medical device

*Velcro® is a registered trademark of Velcro Industries B.V.

Made in Germany

Bestelldaten Ordering data

Produktbeschreibung:	CBC-VECOS® Tourniquet braun 35 mm	
Band:	3.5 cm breit, 65 cm lang	Gewicht
REF 521002 K 001	100 Stück in Spenderbox	385 g
REF 521002 K 005	1 Nachfüllbeutel á 100 Stück	298 g

Product description:	CBC-VECOS® Tourniquet brown 35 mm	
Strap:	3.5 cm wide, 65 cm long	Weight
REF 521002 K 001	100 pcs. in dispenser box	385 g
REF 521002 K 005	1 poly bag with 100 pcs	298 g

