

# CBC VECOS®

## Einweg-Venenstauer Single-use tourniquet



- Keine MRSA-Übertragung – für hochinfektiöse Patienten
- **Gewährleistet optimale Staukraft: ca. 20 mmHg**
- Ideal bei trockener oder sehr feuchter Umgebung
- Luftverladbar – Besonders leichtes Gewicht: 2,5 g/Stück
- Einmalgebrauch: keine Kreuzkontamination
- Einfache Bedienung auch mit Handschuhen (Vlies-Material)
- Der Mikroklett lässt sich leicht öffnen und schließen
- Kostengünstig: auch als Kompresse nach Venenpunktion einsetzbar

- No MRSA transmission – for highly infectious patients
- **Ensuring optimal compression force: ca. 20 mmHg**
- Perfect for humid or very dry environments
- Particularly low weight: 2.5 g/piece
- Single use: no cross-contamination
- Easy to use with gloves on (fleece material)
- The micro-velcro®\* allows for easy opening and closing
- Cost-effective: also usable as compress after venipuncture

\*Velcro® is a registered trademark of Velcro Industries B.V.




Hygienisch. Sanft. Einfach. Sicher.  
Hygienic. Gentle. Easy. Safe.


# CBC VECOS®

## Anwendung Application


**Unbedruckte Seite** zum Arm des Patienten halten. Place **unprinted side** on the patient's arm.

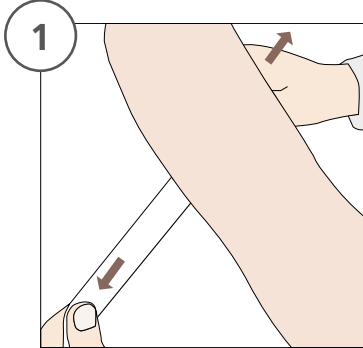

**Band** vollständig auseinanderziehen zum Aufbau der Staukraft.  
Build up compression force by extending the tourniquet completely.

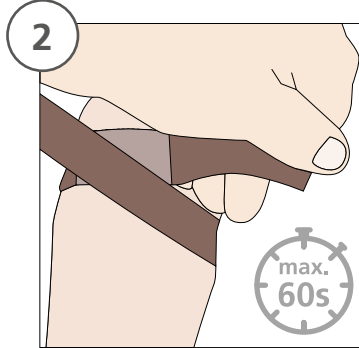

**Straff** um den Arm legen und im Klettbereich fixieren.  
Place strap tightly around the arm and fix at the velcroed®\* area.

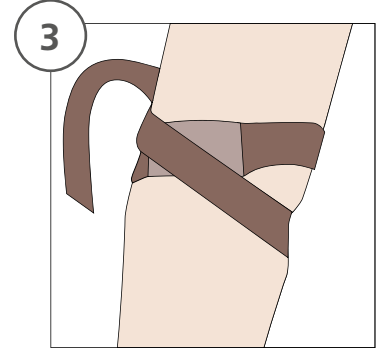

Zum Lösen einfach ziehen.  
Simply pull to release the strap.

Nach Gebrauch nicht wiederverwenden, um Kreuzkontamination zu verhindern, und vorschriftsmäßig entsorgen.

Do not use again after use to avoid cross-contamination and dispose of in accordance with regulations.



Sehen Sie sich das Video zur Anwendung an:  
Watch the video for application:

**SILICONE-FREE**



Medizinprodukt  
Medical device

\*Velcro® is a registered trademark of Velcro Industries B.V.

Made in Germany

## Bestelldaten Ordering data

Produktbeschreibung:	CBC VECOS® Venenstauer braun 35 mm	
Band:	35 mm breit, 700 mm lang	Gewicht
REF 521002 K 001	100 Stück in Spenderbox	385 g
REF 521002 K 005	1 Nachfüllbeutel à 100 Stück	298 g

Product description:	CBC VECOS® Tourniquet brown 35 mm	
Strap:	35 mm wide, 700 mm long	Weight
REF 521002 K 001	100 pcs. in dispenser box	385 g
REF 521002 K 005	1 poly bag with 100 pcs	298 g

